



Kontaktujte nás

+421 907 665 035

info@meditesty.sk

www.meditesty.sk

Nájdete nás

 Meditesty

 Meditesty.sk



HPV Test Komplex

Najkomplexnejší HPV test v našej ponuke. Pokrýva viac ako 95 % všetkých klinicky významných typov HPV. V prípade potvrdenia prítomnosti HPV laboratórium zároveň určí presný genotyp vírusu, ktorý sa vo vašom tele nachádza.

Čo vyšetrenie zahŕňa?

Test potvrdzuje alebo vylučuje prítomnosť:

- **14 vysokorizikových typov HPV (HR-HPV):** 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
- **14 nízkorizikových typov HPV (LR-HPV):** 6, 11, 26, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 69, 70, 73, 82

Nízkorizikové typy HPV sú zodpovedné najmä za vznik genitálnych bradavíc.

Prečo sa otestovať?

HPV nie je len o rakovine. Týka sa aj genitálnych bradavíc. Štandardné HPV testy sa zameriavajú výlučne na vysokorizikové typy vírusu. To znamená, že ak máte bradavice spôsobené napríklad typmi HPV 6 alebo 11, výsledok štandardného testu môže byť negatívny – aj napriek tomu, že infekciu máte. Rovnako fungujú aj naše základné a rozšírené HPV testy – sú zamerané iba na vysokorizikové genotypy. **HPV Test Komplex** je jediný test v našej ponuke, ktorý pokrýva viac ako 95 % všetkých klinicky významných typov HPV.

Prečo je dôležité poznať konkrétny genotyp HPV?

- HPV 16 a 18 predstavujú najvyššie riziko vzniku rakoviny. Spoločne spôsobujú približne 70 % HPV-pozitívnych nádorových ochorení.¹
- HPV 6 a 11 síce nespôsobujú rakovinu, ale patria medzi hlavné príčiny genitálnych bradavíc, ktoré môžu byť fyzicky aj psychicky nepríjemné.¹

Zdroj: 1. Cancer Council Australia. What is HPV?

Dostupné na: <https://www.cancer.org.au/what-is-hpv>

Získajte kontrolu nad vlastným zdravím v pohodlí domova

Meditesty potvrdia alebo vyvrátia vaše obavy z infekčného ochorenia, alergie či inej závažnej medicínskej diagnózy už do 10 dní od odberu.

Kategórie testov

- Sexuálne prenosné ochorenia
- Ženské zdravie
- Mužské zdravie
- Genetické mutácie
- Intolerancie

Certifikované

Všetky naše testy sú certifikované a poskytnú vám kvalifikovanú a rýchlu odpoveď na to, či je vaše podozrenie na niektorú z testovaných diagnóz správne.

Uznávané lekármi

Všetky testy vyhodnocuje akreditované laboratórium a na základe certifikovaného výsledku testu dokáže váš lekár stanoviť vhodnú liečbu.



Postup samotestovania

- 1 Odber vzorky**

Skontrolujte, či má odberová súprava nepoškodený obal. Vyberte odberovú súpravu a pozorne si preštudujte návod na použitie testu. Odoberte vzorku.
- 2 Súhlas s vyšetrením**

Vyplňte informovaný súhlas, ktorý je súčasťou balenia. V prípade, že chcete výsledok vyhodnotiť anonymne, v informovanom súhlase vyplňte iba číslo testu a neuvádzajte svoje osobné údaje. Nezabudnite informovaný súhlas podpísať.
- 3 Uchovanie čísla testu**

Odpíšte alebo si inak uložte číslo svojho testu. **Číselný kód nájdete priamo na odberovej súprave. Číslo testu budete potrebovať pri zisťovaní výsledku.** V prípade anonymného vyšetrenia bude výsledok dostupný iba na stránke po zadaní čísla testu.
- 4 Zabalenie vzorky**

Vzorku

 - zabezpečte podľa návodu na použitie
 - vložte do priloženého plastového obalu
 - spolu s informovaným súhlasom vložte do obálky s predvyplnenou adresou laboratória CYTOPATHOS spol. s r.o.
- 5 Odoslanie vzorky**

Zásielku bezplatne odovzdajte na najbližšom odberovom mieste Packeta alebo na pobočke Slovenskej pošty, najneskôr do 24 hodín od odobratia vzorky.

DÔLEŽITÉ: Na odoslanie vzorky na vyšetrenie použite výhradne poskytovateľa služby, ktorý vám zásielku doručí!

Ak bola doručovateľom zásielková služba Packeta, použite na odoslanie vzorky jej odberné miesto. Ak ste pri nákupe zvolili ako doručovateľa Slovenskú poštu, odneste obálku na najbližšiu pobočku a podajte ju ako listovú zásielku.
- 6 Získanie výsledku**

Výsledok testu si môžete zobrazíť do 10 dní po odoslaní vzorky na meditesty.sk/results. V prípade, že ste nám poskytli v informovanom súhlase svoje osobné údaje, výsledok vám bude doručený na uvedenú emailovú adresu.